



Reemplazo del soporte del monitor de constantes vitales Welch Allyn Connex 6000

Quita tu monitor de constantes vitales Connex de su carrito de oficina o transfíerelo a un nuevo soporte.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para extraer el monitor de constantes vitales Connex del soporte del carrito de oficina de Welch Allen.

TEN EN CUENTA: Esta guía de reparación fue desarrollada por el equipo de iFixit basándose en el propio manual de servicio de Welch Allyn. Ni iFixit ni esta guía de reparación están respaldados o afiliados a Welch Allyn.



HERRAMIENTAS:

- [Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Soporte



- Desenchufa el cable de conexión de alimentación de CA.

Paso 2



- Coloca el pulgar y el índice en el conector de la manguera de presión arterial (NIBP). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.

 Sujeta siempre la manguera por el conector. No tires de la manguera.

- Quita el conector del puerto del conector.

Paso 3



- Coloca el pulgar y el índice en el conector del cable de oximetría de pulso (SpO2 o SpO2 / SpHb combinado). Aprieta las pestañas laterales hasta que se libere el conector.

 Sujeta siempre el cable por el conector. No tires del cable en sí.

- Quita el conector del puerto del conector.

Paso 4



- Sujeta la sonda de temperatura y levántala para sacarla del monitor.

Paso 5



- Quita la cubierta del módulo de temperatura presionando la pestaña y deslizando la cubierta hacia la derecha.

Paso 6



- Presiona la lengüeta de resorte en el conector del cable de la sonda de temperatura y extráela del puerto de la sonda.

Paso 7



- Quita el tornillo de cabeza plana en la puerta de red USB.
- Afloja el tornillo cautivo Phillips # 2 que fija el monitor al soporte.

Paso 8



- Sosteniendo el monitor de forma segura, abre la puerta de red USB.
- ⓘ Puede que tengas que levantar el monitor ligeramente para permitir que la puerta salga del soporte.

Paso 9



- Desconecta los cables USB accesorios de los puertos USB en el monitor.

Paso 10



- Desliza el monitor fuera de la bandeja del soporte.

Para volver a reensamblar su dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.